

# MACHEREY-NAGEL

## NANOCOLOR<sup>®</sup> App

Análisis de agua



Toda la información de un vistazo

- Certificado
- Guía
- Pictograma
- Ficha técnica de seguridad

# NANOCOLOR® App – Toda la información de un vistazo

La aplicación NANOCOLOR® permite el escaneado de códigos de barras 2D para los kits NANOCOLOR® y usa la información incluida proporcionando un acceso rápido y fácil a toda la información importante para sus experimentos. Certificados por cada lote son generados automáticamente desde la base de datos analítica en el código de barras 2D.

## Código de barras fácil de leer

Las cajas de nuestros tubos de ensayo NANOCOLOR® están equipados con un código de barras 2D que contiene toda la información relevante. La app lee este código de barras, analiza la información guardada y directamente muestra el nombre del experimento, el número de muestra y su fecha de caducidad.

## Crea certificados

Basado en la información que contiene el código de barras 2D, la app muestra información de la evaluación analítica del test. También puede crear certificados específicos para lotes como archivos pdf los cuales se pueden ver, compartir o imprimir.

## Lea el folleto de información

Después de elegir la opción "hoja de información", la app le muestra la hoja de información en formato pdf. Información importante del test, como desviaciones analíticas o conformidad con métodos ISO están disponibles inmediatamente.

## Ver pictogramas


Para la mayoría de los tubos de ensayo NANOCOLOR® la información está disponible en forma de pictogramas. Estos proporcionan información básica y permiten el desarrollo del test sin tener que leer el hoja de información. Están diseñados para ayudar a los usuarios inexpertos, pero también sirven como recordatorio para expertos. La app proporciona un acceso rápido a esos pictogramas y los muestra en óptima calidad.

## Ficha de datos de seguridad

FDS (MSDS en inglés) contiene información importante sobre los peligros potenciales y su prevención. Incluso sin conexión a internet, la app NANOCOLOR® le permite acceso directo a estos documentos para así tomar las medidas necesarias de forma inmediata.

## Todo sin conexión

Para escanear un código de barras 2D, crear un certificado o abrir documentos, no necesita conexión a internet. Así tiene toda la funcionalidad de la aplicación disponible también sin internet.

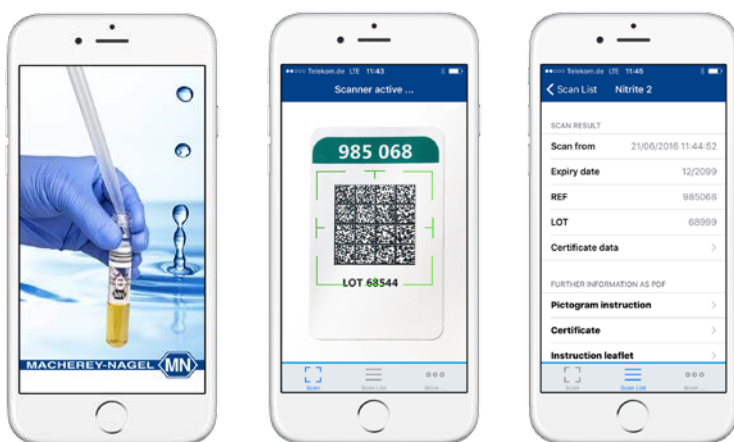

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.  
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Alemania

DE / Internacional:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)

